

GEBRAUCHSANWEISUNG

TheraKid



Hilfsmittel-Nummer
für alle TheraKids
20.29.04.0001


HESER
therapieliegen

Inhaltsverzeichnis

S. 3	Anlieferung
S. 4	Produktübersicht
S. 5	Produktbeschreibung
	Zweckbestimmung
	Indikation
S. 6	Aufbau
	Warnhinweise, Sonstige Hinweise
S. 7	Umgebung und Nutzungskontext
	Therapie
S. 8	Beispiele aus dem Therapie-Alltag
	Reinigung
	Abbau
S. 9	Spezifikation
	Produkt Aufbau + Technische Daten
	Material Eigenschaften
	Material Zusammensetzung
S. 10	Auf dem Produkt und der Kennzeichnung verwendete Symbole

**Liebe Patienten,
Eltern und Therapeuten,**

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eine TheraKid Therapieliege aus unserem Haus entschieden haben. Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor der ersten Therapieanwendung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Die TheraKid bietet Ihnen die Möglichkeit im häuslichen Umfeld die täglich notwendige Krankengymnastik fachgerecht und ergonomisch durchzuführen. TheraKid unterstützt Sie optimal beim Therapieren.

Für Fragen rund um die TheraKid stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Veronika Hesel
Heser Therapieliegen

In diesem Video wird die Anwendung der TheraKid beschrieben:
<https://www.youtube.com/watch?v=GEHw7TBPOII>



Diese Gebrauchsanweisung gilt für folgende Produkte

	TheraKid 10 <i>für Kinder</i>	TheraKid 15 <i>für Kinder</i>	TheraKid 20 <i>für Kinder</i>	TheraKid XL <i>für Kinder, Jugendliche</i>	TheraKid XXL <i>für Kinder, Jugendliche, Erwachsene</i>
Maße (BxTxH)	ca. 120 x 70 x 10 cm	ca. 120 x 70 x 15 cm	ca. 120 x 70 x 20 cm	ca. 150 x 80 x 10 cm	ca. 180 x 80 x 10 cm
Gewicht	5 kg	7 kg	7,5 kg	8 kg	8,5 kg
Packmaß	ca. 120 x 70 x 10 cm	ca. 120 x 70 x 15 cm	ca. 120 x 70 x 20 cm	ca. 80 x 75 x 20 cm	ca. 80 x 60 x 30 cm
Größe des Co- Therapeuten	kleiner als 1,65 m	von 1,65 m bis 1,80 m	größer als 1,80 m	für jede Größe	für jede Größe
Empfohlener Einsatzbereich	Tisch, Boden	Tisch, Boden	Tisch, Boden	Tisch, Boden, Pflegebett	Tisch, Boden, Pflegebett
Tragegriff	✓	✓	✓	✓	✓
Elemente	einteilig	einteilig	einteilig	2-teilig	3-teilig
Farbe					
Bestell-Nr. REF/Artikel-Nr.	0910	0915	0920	0925	0930

Die Gebrauchsanweisung finden Sie auf unserer Webseite zum Download oder kann bei uns angefordert werden:



www.therakid.de

Heser Therapieliegen
Remsstraße 15
D-73650 Winterbach
Telefon +49 (0) 7181 256209
Telefax +49 (0) 7181 256267
info@therakid.de
www.therakid.de

Produktbeschreibung

Unsere Therapieliegen ermöglichen Kindern und Erwachsenen Zuhause, was beim Therapeut Standard ist: das regelmäßige, dringend notwendige Fördern und Begleiten verschiedenster Arten von Krankengymnastik. TheraKid unterstützt optimal beim effektiven und ständigen Therapieren und hilft so, drohenden Behinderungen soweit als möglich entgegen zu treten, vorzubeugen und auszugleichen.

Der richtige TheraKid-Härtegrad, bzw. die richtige Kantenweichheit, beugt Druckstellen und Verletzungen am Patient vor. Die TheraKid bietet eine gute Formstabilität und ist somit einsetzbar in der Physiotherapie bei fast allen neurologischen und orthopädischen Krankheitsbildern. Die richtige TheraKid-Auswahl ermöglicht dem Therapeut effektives, rückenschonendes Therapieren in guter Arbeitshöhe.

Zahlreiche krankengymnastische Behandlungsformen, insbesondere die Behandlung der Zentralen Koordinationsstörung und der zerebralparetischen Bedrohung im Säuglingsalter sowie die Behandlung der fixierten Zerebralparese vor vollständiger Ausreifung des ZNS, erfordern neben der professionellen Behandlung durch die Krankengymnastin eine häusliche Therapie, die (in der Regel von den Eltern) mehrmals täglich durchgeführt werden muss.

Der Erfolg der Behandlung hängt sehr wesentlich von einer präzisen Ausgangsposition des Kindes ab, die während des Behandlungsverlaufes „dynamisch gehalten“ werden muss, um einen entsprechenden Behandlungserfolg zu erreichen.

Zweckbestimmung

TheraKid ist eine mobile Therapieliege zur Unterstützung krankengymnastischer Behandlungsformen in medizinischen Einrichtungen, Pflegeheimen, Frühförderstellen, Förderschulen und im häuslichen Bereich.

TheraKid unterstützt die Physiotherapie z.B. bei folgenden Diagnosen

- Säuglinge aus dem perinatalogischen Problemkreis, vor allem ehemalige Risiko-Neugeborene und Frühgeborene mit Folgekrankheiten
- Säuglinge mit Entwicklungsstörungen im motorischen Bereich sowie mit Störungen des Haltungsapparates, zentraler Koordinationsstörung bis hin zur bereits manifesten Zerebralparese
- Kinder mit Missbildungen des Gehirns und des Rückenmarks, sowie Kinder mit Hydrozephalus
- Kinder mit infantiler Zerebralparese
- Kinder mit Retardierung der motorischen und /oder der geistigen Entwicklung
- Kinder mit neurodegenerativen Erkrankungen und neuromuskulären Erkrankungen
- Kinder mit metabolischen Erkrankungen, Chromosomenanomalien und Syndrom-Patienten mit Mehrfachbehinderungen
- Kinder und erwachsene Schlaganfall-Patienten, MS-Patienten

Kontraindikationen: sind keine bekannt

Aufbau

Nehmen Sie die TheraKid aus dem Karton. Entfernen Sie die transparente PVC- Schutzfolie und legen sie die TheraKid mit der weißen Antirutschmatte nach unten auf den Tisch. Legen Sie keine Tischdecke oder weitere Unterlagen zwischen TheraKid und Tischplatte. Achtung: TheraKid immer ganzflächig auflegen (mit der TheraKid nie zwischen 2 Stühlen oder auf der Badewanne therapieren).

Alle TheraKid Therapieliegen werden in **komplett fertigem, einsetzbarem Zustand** geliefert. Legen Sie die Therapieliege mit ihrer Unterseite - der Antirutschmatte - nach unten auf Ihren Tisch, das Pflegebett oder auf den Boden... fertig! Tisch und TheraKid zusammen ergeben die optimale Höhe zum effektiven Therapieren.



Sicherheitsrelevante Warnhinweise

1. Bitte lassen Sie ihr Kind nicht unbeaufsichtigt auf der TheraKid. Aufgrund der Sturzgefahr muss das Kind auf der TheraKid immer beaufsichtigt werden.

2. TheraKid vollflächig auflegen – die TheraKid könnte während der Therapie ins Kippen geraten.

Voraussetzung für den Aufbau der TheraKids: Stellen sie sicher, daß die Auflagefläche mindestens der Grundfläche der TheraKid entspricht. Dies dient zur Vermeidung von Überhängen.

Die individuelle optimale Übungshöhe wird beim Physiotherapeut ermittelt, die Auswahl der Höhe der TheraKid wird entsprechend der vorhandenen Tischhöhe im häuslichen Umfeld festgelegt.

3. Verwenden Sie keine schützende Bezüge über der TheraKid während der Therapie, da sonst die Ausführung der Übungen leiden könnte.

Sonstige Hinweise

4. Kontakt mit scharfkantigen oder harten Gegenständen wie zum Beispiel Orthesen sind zu vermeiden, um eine Beschädigung der TheraKid zu verhindern.

5. TheraKid nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen lagern. Gefahr der Beschädigung des Kunstleders.

6. Der Transport der TheraKid Modelle XL und XXL muss immer unter Verwendung beider Tragegriffe erfolgen, ansonsten droht durch Überlastung im Griffbereich ein Einreißen des Kunstleders.

7. Die Belastungsgrenze ist maximal 100 kg. Belastung oberhalb der Belastungsgrenze kann eine Stauchung/Deformation des Hartschaumstoffkerns verursachen.

8. Die TheraKid ist abwaschbar. Eine vollständige Durchtränkung der TheraKid ist zu vermeiden, da durch die abgeschlossene Umhüllung keine vollständige Trocknung möglich ist.

Umgebung und Nutzungskontext

- Bei physiotherapeutischen Einrichtungen, Ärzten, Ergotherapeuten, Logopäden und im häuslichen Bereich, Pflegeheime, Frühförderstellen, Kindertagesstätten für behinderte Kinder, Förderschulen
- Der Einsatz erfolgt auf dem Boden, auf belastungsstabilen Tischen und Pflegebetten.
- Die TheraKid darf nur in Bereichen genutzt werden, die eine vollflächige Auflage sicherstellt.
- Die TheraKid ist keine Wickelauflage im privaten, sanitären Bereich (z.B. Badewannenaufsatz)


Da die TheraKid oft auf erhöhten Unterlagen aufgelegt wird (Tisch, Pflegebett) muss eine permanente Beaufsichtigung des Kindes/Patient gewährleistet sein.

Therapie

Die Kanten der TheraKid sind weich gepolstert. Sie ermöglichen Übungen im Überhang (z.B. bei Vojta: 1. Position, Schlucht, Reflexkriechen im Überhang, etc.). Die Höhe ermöglicht einen ergonomisch, optimalen Krafteinsatz des Behandlers und ein rückschonendes Arbeiten.



Beispiele aus dem Therapie-Alltag

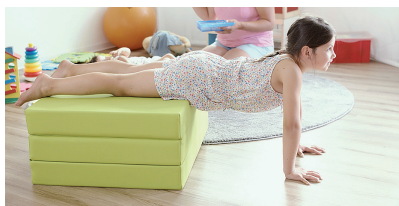

Reinigung

Wischen Sie die TheraKid bei normaler Verschmutzung mit einem feuchten Tuch, mit Wasser verdünntem Spül- oder Desinfektionsmittel ab (ca. 1x pro Woche). Es kann handelsüblicher Trockenschaum verwendet werden. Das Oberflächenmaterial ist urin-, blut- und desinfektionsmittelbeständig und antibakteriell. TheraKid braucht keine materialerhaltende Pflege. Urin zwischen Tisch und TheraKid können Sie mühelos abputzen.



Abbau

Die TheraKid kann sehr schnell abgebaut und verstaut werden. Achtung: Die TheraKid darf nicht direkt neben einer Heizung oder einer anderen Wärmequelle liegen.



Spezifikation

	TheraKid 10 für Kinder	TheraKid 15 für Kinder	TheraKid 20 für Kinder	TheraKid XL für Kinder, Jugendliche	TheraKid XXL für Kinder, Jugendliche, Erwachsene
Maße (BxTxH)	ca. 120 x 70 x 10 cm	ca. 120 x 70 x 15 cm	ca. 120 x 70 x 20 cm	ca. 150 x 80 x 10 cm	ca. 180 x 80 x 10 cm
Gewicht	5 kg	7 kg	7,5 kg	8 kg	8,5 kg

Alle TheraKids sind in 4 verschiedenen Farben erhältlich.

Bei sachgemäßer Anwendung hat die TheraKid eine Lebensdauer von 5 Jahren.

Produkt Aufbau + Technische Daten

TheraKid, die mobile Therapieliege, bestehend aus einem Hartschaumstoffkern, ummantelt mit Schaumstoffplatten, einem Kunstlederbezug mit integrierter Antirutschmatte. Produktionsbedingt ist auf der Unterseite ein Reißverschluss angebracht. Dieser wird in einem weiteren Produktionsschritt verklebt und ist so für den Anwender nicht mehr zu öffnen. Je nach TheraKid-Modell und Größe sind 1 oder 2 Tragegriffe an der TheraKid angebracht.

- Phthalatfrei – teilweise mit nachwachsenden, nicht auf Erdöl basierenden Rohstoffen
- ÖKO TEX Standard 100 – Produktklasse 1: Baby
- DIN EN 71-3 – Sicherheit von Spielzeug: Abgabe von Schwermetallen unterhalb der Nachweisgrenze
- Materialschutz: antimikrobiell, antibakteriell, antimykotisch
- Speichel- und schweißecht
- Biokompatibel – Beständig gegen: Massageöle, Urin und Blut
- Gewicht 650 g/qm
- Dicke 1,10 mm
- EN ISO 10993-5 Biokompatibel
- EN ISO 10993-10 Epikutanttest
Löst keine Irritationen oder Allergien aus
- EN 1021 part1 + 2 - Schwerentflammbarkeit

Material Eigenschaften

- Lange Haltbarkeit
- Pflegeleicht
- Angenehm weich
- Schwerentflammbar
- Guter Griff
- Dehnfähig
- Abriebfest
- Wasserundurchlässig
- Reiß und weiterreißfest
- Urin- und blutbeständig
- Desinfektionsmittelbeständig
- Antibakteriell-fungizid

Material Zusammensetzung

- 11% Bw-PES, 89% PVC



CE-Kennung nach
(EU) 2017/745 (MDR)
Made in Germany

Bitte melden Sie uns alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen etwaigen schwerwiegenden Vorkommnisse. Bitte melden Sie als Therapeuten solche etwaigen schwerwiegenden Vorkommnisse auch der zuständigen Behörde des Landes in dem Sie Ihren Sitz haben - also in Deutschland über das Deutsche Medizinprodukteinformations- und Datenbanksystem an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.

Auf dem Produkt und der Kennzeichnung verwendete Symbole

Symbol	Bedeutung
	Hersteller
	Achtung: verweist den Anwender auf wichtige sicherheitsbezogene Angaben
	Medical Device Medizinprodukt
	<u>TheraKid</u> Serien-Nummer
	Herstellungsdatum
	<u>TheraKid</u> Artikel-Nummer
	Unique Device Identification <u>TheraKid</u> Produktidentifikation
	CE-Kennzeichnung für Medizinprodukte
	Gebrauchsanweisung beachten

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Bitte füllen Sie diesen Bewertungsbogen aus.

Wir freuen uns über Ihr Feedback und nehmen Ihre Meinung gerne an.

			
Qualität	☐	☐	☐
Zufriedenheit	☐	☐	☐
Reinigung	☐	☐	☐
Anwendung in der Praxis	☐	☐	☐
Funktionalität	☐	☐	☐
Bedienbarkeit	☐	☐	☐

Haben Sie Anmerkungen zu dem Produkt?

Was hat Ihnen gut gefallen?

Was hat Ihnen nicht gefallen?





Remsstraße 15 · 73650 Winterbach
Tel. 07181 256209 · Fax 07181 256267
www.therakid.de · info@therakid.de